

		PRODUCT NAME <b>ENDWARTS BOTTLE 5 ML</b>		Cod. L.G00888/18 <b>POOLPRINT</b>	
PRODUCT TYPE <b>LEAFLET</b>		USE <b>SALE</b>		LANGUAGE <b>CZ</b>	
COUNTRY <b>CZ/SK</b>		PRODUCT CODE <b>15158</b>		CODE	
PACK SIZE <b>295x420 mm</b>		BARCODE - DATAMATRIX		MINI FONT SIZE <b>7 PT</b>	
COLORS: <b>4</b>		<b>BLACK</b>		<b>PMS 151 C</b>	
		<b>PMS 485 C</b>		<b>PMS 161 C</b>	
DATE OF PREPARATION: <b>21-03-2022</b>					

## NÁVOD K POUŽITÍ



**ŽÍRAVINA**

Před použitím si pečlivě přečtěte návod.  
Návod k použití uschovejte.  
Možná si ho budete potřebovat přečíst znovu.  
Pouze k zevnímu použití.  
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

- Co je prostředek Endwarts Original a k čemu se používá
- Cemu musíte věnovat pozornost, než začnete Endwarts Original používat
- Jak se Endwarts Original používá
- Možné nežádoucí účinky
- Uchovávaní a další informace

# EndWarts ORIGINAL

## 1. CO JE PROSTŘEDEK ENDWARTS ORIGINAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Prostředek EndWarts Original je účinným roztokem pro odstraňování bradavic. Roztok je určen k ošetření bradavic na rukou, chodidlech, loktech a kolenou dospělých i dětí. Díky svému složení pomáhá prostředek EndWarts tělu bradavice vysušit a vyloučit. EndWarts roztok je absorbován přímo do bradavice a nezanechává na kůži žádné stopy. Ihned po jeho aplikaci si můžete například natáhnout ponožky nebo se vykoupat. Prostředek EndWarts Original je baktericidní a při správném používání nezanechává žádné jizvy ani nepůsobí infekce. Jedna lahvička EndWarts Original vystačí zhruba na 30 ošetření 1–5 bradavic.

## 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ENDWARTS ORIGINAL POUŽÍVAT

### 2.1 KDY ENDWARTS ORIGINAL NEPOUŽÍVAT

- Nepoužívejte na bradavice na obličejí nebo genitálních, na molusky, mateřská znaménka, kuří oka, ztvrdlou kůži ani na jiné kožní vady. V případě pochybností o Vaší diagnóze, kontaktujte svého lékaře.
- Po aplikaci prostředku EndWarts Original nepoužívejte náplast. Použití náplasti může poškodit pokožku, viz část 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY.
- Těsně před, během nebo po aplikaci neaplikujte na zdravou pokožku v okolí bradavice oleje nebo pleťová mléka.
- Nepoužívejte, je-li ošetřovaná bradavice citlivá, krvácí nebo pokožka jeví známky podráždění. Přerušete aplikaci, dokud se kůže nezregeneruje.
- Prostředek EndWarts Original nepoužívejte v kombinaci s jinými prostředky pro odstranění bradavic.
- Prostředek EndWarts Original nepoužívejte, pokud jste alergičtí na některou z jeho složek, viz část 5. UCHOVÁVÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE.

### 2.2 UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ

Prostředek EndWarts Original je žiravina se silným, dráždivým zápachem. Nevdechujte. Pouze k vnějšímu použití. **Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.**



Nepředávkujte! Příliš silná nebo nesprávná aplikace může způsobit bolest a poškodit pokožku, viz část 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY.

- Použijete-li roztoku příliš mnoho nebo jím nechtěně potřísníte pokožku, okamžitě postižené místo omyjte větším množstvím studené vody, abyste zamezili poškození pokožky.
- Jestliže vám roztok vnikne **do očí**, okamžitě je alespoň 15 minut opakovaně vyplachujte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud nosíte kontaktní čočky, okamžitě je vyjměte a vypláchněte oči dle instrukcí.

Zvlášť opatrní buďte při ošetřování jemné pokožky, například u dětí nebo v horní části ruky, viz část 3.1 DÁVKOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ a 3.2 POUŽITÍ U DĚTÍ.

## 3. JAK SE ENDWARTS ORIGINAL POUŽÍVÁ

### 3.1 DÁVKOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ

K účinnému použití stačí jen nepatrné množství roztoku. Dávejte pozor, abyste se dotkli pouze bradavice a **nedotýkali se okolní kůže**; pokud se dotknete okolní kůže nebo pokud cítíte štípání, okamžitě místo omyjte studenou vodou, abyste utiřili bolest (viz také 2.1 KDY ENDWARTS ORIGINAL NEPOUŽÍVAT a 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY). Pozorně si přečtěte níže uvedené pokyny, neboť roztok je žiravina. Při aplikaci vždy použijte štěteček, který je součástí víčka. Při aplikaci roztoku zvlášť pečlivě chraňte lahvičku, aby se tekutina nerozlila.

Když provádíte ošetření, nedržte lahvičku v ruce. Lahvičku položte na dřez nebo podobné místo. Rozlitá tekutina by mohla poškodit nejen pokožku, ale i povrchy s malbou, textilie apod. Po použití lahvičku vždy pevně uzavřete dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem.

**1** Držte láhev pevně a opatrně otevřete uzávěr s dětskou bezpečnostní pojistkou. Při prvním použití silou odstraňte bezpečnostní kroužek a před úplným vytáhnutím štětečku jej opatrně nechte asi 1 sekundu odkapat na vnitřní vložce lakvičky, aby se odstranil přebytek roztoku ze štětečku. Dbejte na to, aby byl roztok odkapán do vnitřku lahvičky a ne mimo ní; roztok je žiravý a při styku s normální pokožkou může způsobit poškození kůže (viz 4. Možné nežádoucí účinky). Štěteček by měl být jen vlhký.

**2** Nezapomeňte nechat odkapat štěteček (jak je uvedeno v bodě 1.). Poté s ním dvakrát natřete bradavici pokaždé po dobu jedné sekundy. Dávejte pozor, abyste se nedotkli okolní pokožky. Pokud se dotknete okolní pokožky nebo pokud máte pocit pálení na pokožce, okamžitě ji umyjte studenou vodou, abyste zmírnili bolest. Bradavice umístěné na spodní straně rukou, na spodní straně chodidel, na vnitřní straně kolen nebo na vnější straně loktů, kde je pokožka citlivější, by měly být ošetřeny opatrně, aby nedošlo k dotyku s okolní kůží.

Vždy používejte štěteček spojený s víčkem. Pokud se štěteček poškodí nebo vytrhne, přestaňte prostředek používat.

Prostředek EndWarts Original může používat více než jedna osoba. Než po vás začne další osoba používat prostředek EndWarts Original, zavřete víčko a ponechte štěteček v kontaktu s roztokem v lahvičce po dobu nejméně 5 minut. Tím se zabrání případnému přenesení bradavic na druhou osobu. Chcete-li dosáhnout úspěšných výsledků, provádějte toto ošetření **pravidelně** jednou týdně, dokud bradavice zcela nezmizí. Jinak se proces zastaví. Je-li aplikace nepravdělná, trvá celý proces déle.

**Staré nebo velké bradavice** u dospělých je možné po 4–5 aplikacích ošetřovat každý pátý den, není-li kůže podrážděná. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem. **Nepoužívejte častěji než jak je uvedené v tomto návodu na použití.**

Při ošetřování bradavic na **tenké pokožce** občas postačí méně roztoku. V takovém případě před ošetřením přebytečný roztok setřete ubrouskem. Ošetřujte méně často, zhruba každý druhý nebo třetí týden.

Při ošetření **více bradavic** nejprve vyberte určitý počet bradavic, které začnete ošetřovat, a ošetřujte je po dobu dvou týdnů. Pokud kůže zůstane nepoškozená, pokračujte i u zbývajících bradavic. Několik malých bradavic lze ošetřit najednou, aniž byste štěteček znovu namáčeli do lahvičky EndWarts Original (podle velikosti lze na jedno namočení ošetřit 1–5 bradavic, někdy i více). Začněte většími bradavicemi.

Mezi ošetřeními bradavici změkčujte běžným tělovým mlékem nebo olejem. Zbytky bradavice se pak budou snáze uvolňovat.

Bradavice se také zpočátku může zvětšit a zbělat, než začne vysychat. Když se bradavice zvětší, okolní pokožka může být citlivější. Dbejte, aby bradavice nebyla zarostlá do kůže, která by ji překrývala (viz níže). Je-li bradavice citlivá nebo v ní tepe, může se tak stát proto, že jste použili příliš mnoho roztoku (viz část 2.1 KDY ENDWARTS ORIGINAL NEPOUŽÍVAT), případně se bradavice nemůže dostat ven, neboť je zarostlá v kůži. Je-li bradavice zarostlá kůží, je třeba kůži otevřít, například pinzetou, aby se bradavice mohla dostat ven. Je-li bradavice stará nebo ztvrdlá, před ošetřením namočte postižené místo do teplé vody, aby kůže i bradavice změkla. Kůži na vrcholu bradavice propíchněte nebo oskrábněte (například pinzetou). V případě silné kůže

u zarostlých veruk (bradavice na nohou) opatrně odstraňte ztvrdlou kůži. V případě kutikulárních bradavic bude možná třeba svrchní kůži tence propíchnout, aby roztok mohl proniknout k bradavici. Bradavice nepilujte. Bradavice se pak mohou stát citlivějšími a znovu ztvrdnout.

Po několika ošetřeních se na bradavicích obvykle objeví černé skvrny. Jedná se o tenké krevní kapiláry, které bradavici zásobují krví. Znamená to, že bradavice je již na ústupu. Je třeba pokračovat v aplikaci, dokud zcela nezmizí černé skvrny i celá bradavice. Tyto černé skvrny mohou občas při rozkrábání trochu krváčet. V takovém případě před aplikací prostředku EndWarts Original několik minut počkejte, dokud krvácení nepřestane, jinak může ošetření trochu pálit či štípat. Pokud postižené místo páli či štípe, bolest ihned utište studenou vodou.

### 3.2 POUŽITÍ U DĚTÍ

U dětí by měl ošetření vždy provádět dospělý. Pečlivě dodržujte pokyny uvedené v části 3.1 DÁVKOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ, neboť roztok je žiravina. Malé děti mají měkkou a tenkou pokožku. Na bradavice u dětí proto používejte EndWarts Original velmi střídavě. Jedno namočení postačí na ošetření více bradavic. Bradavice obvykle vymizí po 2–3 ošetřeních.

U dětí **mladších 4** let lze EndWarts Original použít také, ale je třeba vždy pečlivě ověřit, zda se skutečně jedná o bradavici a ne o jiný kožní defekt. Před ošetřením se proto vždy poraďte s praktickým nebo dětským lékařem. V případě dětí mladších 4 let je zvlášť důležité používat menší množství roztoku. Ošetřujte méně často, zhruba každý druhý nebo třetí týden.

- Vždy nejprve ubrouskem setřete přebytečný roztok a teprve pak na bradavici jednou nebo dvakrát zlehka zatlačte.
- Dávejte pozor, abyste se nedotkli okolní pokožky.
- Pokud má dítě tendenci si postižené místo cumlat, můžete ošetřené místo omýt vodou. Roztok již do bradavice pronikl.
- Pokud postižené místo při ošetřování páli nebo štípe, omyjte bradavici chladnou vodou a již na ni nenanášejte žádný další roztok. Znamená to, že roztok již do bradavice pronikl.

### 3.3 POUŽITÍ U NEMOCNÝCH S DIABETEM

Diabetici by měli prostředek EndWarts Original používat s mimořádnou opatrností a pouze na bradavice na zdravé kůži (nepoškozené a nepostižené diabetickým onemocněním). V případě problémů se vždy poraďte s lékařem, sestrou nebo odborníkem na péči o nohy.

### 3.4 ZA JAK DLOUHO BY SE LAHVIČKA ENDWARTS MĚLA SPOTŘEBOVAT

Prostředek EndWarts Original je velmi účinný – většina bradavic zmizí a už se znovu neobjeví. Občas se ale mohou po začátku aplikace objevit bradavice, které byly doposud skryty pod kůží.

Bradavice mohou vypadat velmi odlišně a stejným způsobem se může lišit i doba potřebná k jejich odstranění, což obvykle bývá 5–15 ošetření. Může ale trvat kratší i delší dobu. Faktory ovlivňující trvání odstranění bradavic zahrnují váš věk, typ bradavice, váš imunitní systém, umístění bradavice a jak dlouho je již bradavice přítomna. Snížená imunitní obrana a užívání některých léků, například kortikosteroidů, mohou trvání odstranění prodloužit. Nově bradavice lze obvykle snáze odstranit než bradavice staré. Bradavice u dětí lze obvykle odstranit snáze než u dospělých. V případě zarostlých veruk a kutikulárních bradavic, které mohou být přítomny i mnoho let, může trvat značně dlouho, než aplikace začne řádně účinkovat, a bradavice může také zmizet až za mnohem delší dobu.

### 3.5 KDY BYCH MĚL/-A PŘESTAT ENDWARTS ORIGINAL POUŽÍVAT

Prostředek EndWarts Original přestaňte používat, pokud na bradavici nejsou žádné viditelné černé tečky nebo pokud bradavice vypadla, seschla, nebo jestliže se na jejím místě objevila „díra“. Kůže se potom vrátí k normálu. Budete-li v aplikaci pokračovat příliš dlouho poté, co bradavice zmizí, kůže zřůžoví a bude trochu vodnatá. V takovém případě je třeba používání prostředku EndWarts Original okamžitě přerušit. Po několika týdnech zkontrolujte místo dřívějšího výskytu bradavice: zpozorujete-li malou tečku, může to znamenat, že v kůži ještě zůstaly zbytky bradavice. V takovém případě bude třeba ošetření prostředkem EndWarts Original zopakovat.

### 3.6 TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ

Neexistují žádná známá rizika při používání EndWarts Original, která by se týkala těhotných a kojících žen.

## 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Prostředek EndWarts Original obsahuje silnou kyselinu. Pokud je roztoku použito příliš mnoho nebo je-li použit nesprávně, může dojít k poškození kůže (viz část 2.1 KDY LAHVIČKU ENDWARTS NEPOUŽÍVAT). Dodržujte pokyny uvedené v části 3.1 DÁVKOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ, abyste předešli poškození pokožky.

Na místě aplikace se mohou dočasně objevit nežádoucí účinky, například citlivost, štípání, bolest, pocit pálení nebo krvácení z krevních kapilár. Přerušete aplikaci, dokud se kůže nezregeneruje.

Předávkování, nesprávné použití nebo polížení může způsobit vážnější nežádoucí účinky, například puchýře, rány, tmavou pigmentaci kůže, poleptání, zánět, odumření tkáně (nekrózu) nebo zjizvení. Poškozené místo udržujte v čistotě, abyste předešli infekci. Přerušete aplikaci a v případě vážného poškození kůže kontaktujte lékaře.

Prostředek EndWarts Original má silný zápach, který může dráždit respirační orgány a oči. K obsahu lahvičky nečichajte. Nežádoucími účinky může být podráždění respiračního systému nebo krku, příznaky rýmy, slzení očí nebo potíže s dýcháním.

Ojediněle byla hlášena alergická reakce, například zarudnutí, vyrážka nebo svědění.

## 5. UCHOVÁVÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE

**Uchovávaní:** Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při pokojové teplotě (15–25 °C), mimo dosah přímého slunečního světla.


**Obsah:** kyselina mravenčí, voda, glycerol.

**Balení:** Skleněná lahvička s dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem a s víčkem spojený štěteček, která obsahuje 3 ml nebo 5 ml roztoku, návod k použití.

**Doba použitelnosti:** Viz doba použitelnosti uvedená na lahvičce a na krabičce.

Datum poslední úpravy tohoto návodu k použití: Leden 2021.

		PRODUCT NAME <b>ENDWARTS BOTTLE 5 ML</b>		Cod. LG00888/18 <b>POOLPRINT</b>	
PRODUCT TYPE <b>LEAFLET</b>		USE <b>SALE</b>		LANGUAGE <b>SK</b>	
COUNTRY <b>CZ/SK</b>		PRODUCT CODE <b>15158</b>		MIN. FONT SIZE <b>7 PT</b>	
PACK SIZE <b>295x420 mm</b>		BARCODE - DATAMATRIX			
COLORS: <b>4</b>		<b>BLACK</b>		<b>PMS 151 C</b>	
		<b>PMS 485 C</b>		<b>PMS 161 C</b>	
DATE OF PREPARATION: <b>21-03-2022</b>					

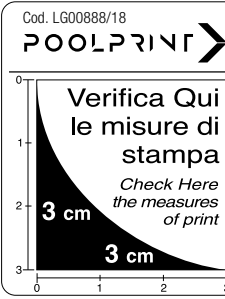

## NÁVOD NA POUŽITIE



**ŽIERAVINA**

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Tento návod na použitie si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ho znova prečítali. Len na vonkajšie použitie. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

1. Čo je EndWarts ORIGINAL a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým ako použijete EndWarts ORIGINAL
3. Ako používať EndWarts ORIGINAL
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať EndWarts ORIGINAL a ďalšie informácie

# EndWarts ORIGINAL

## 1. ČO JE ENDWARTS ORIGINAL A NA ČO SA POUŽÍVA

EndWarts ORIGINAL je účinný roztok na odstránenie bradavíc. Roztok je určený na ošetrovanie bradavíc na rukách, chodidlách, lakťoch a kolenách. Je určený dospelým aj deťom. Zloženie EndWarts ORIGINAL pomáha telu bradavice vysušiť a odlúčiť. EndWarts roztok sa vstrebáva priamo do bradavice a nezanecháva na koži žiadne stopy. Ihneď po jeho použití si teda môžete napríklad natiahnuť ponožky alebo sa vykúpať. EndWarts ORIGINAL je bakteriocídny a pri správnom použití nezanecháva jazvy ani nespôsobuje infekcie. Jedno balenie EndWarts ORIGINAL vystačí zhruba na 30 ošetrení 1 – 5 bradavíc.

## 2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ PREDTÝM AKO POUŽIJETE ENDWARTS ORIGINAL

### 2.1 NEPOUŽÍVAJTE ENDWARTS ORIGINAL

- Nepoužívajte na ošetrovanie bradavíc na tvári, genitáliách, na molusky, materské znamienka, kurie oká, stvrdnutú kožu alebo iné kožné defekty. Ak si nie ste istý s diagnózou, obráťte sa na svojho lekára.
- Nepoužívajte náplast' po aplikácii EndWarts ORIGINAL. Použitie náplasti môže poškodiť pokožku (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky).
- Bezprostredne pred, počas alebo po aplikácii nechráňte normálnu pokožku obklopujúcu bradavicu olejmi alebo pletovými vodami.
- Nepoužívajte, ak je bradavica po ošetrovaní citlivá, krváca alebo pokožka javí známky podráždenia. Prerušte aplikáciu, pokiaľ sa koža nezregeneruje.
- Nekombinujte EndWarts ORIGINAL s inými prostriedkami na odstránenie bradavíc.
- Nepoužívajte EndWarts ORIGINAL, ak ste alergický na ktorúkoľvek zložku prípravku (pozri časť 5. Uchovávanie a ďalšie informácie).

### 2.2 UPOZORNENIA A OPATRENIA

EndWarts ORIGINAL je žieravina s dráždivým a silným zápachom. Nevdychujte. Len na vonkajšie použitie.

**Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.**



Nepoužívajte nadmerne! Nadmerné alebo nesprávne použitie môže spôsobiť bolesť a poškodenie pokožky (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky).

- Ak použijete príliš veľa roztoku alebo ho náhodou aplikujete na okolitú pokožku, postihnuté miesto okamžite opláchnite väčším množstvom studenej vody, aby ste zabránili poškodeniu pokožky.
- Ak vám roztok vnikne **do očí**, okamžite ho aspoň 15 minút opakovane vyplachujte studenou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak nosíte kontaktné šošovky, okamžite ich odstráňte a vypláchnite oči podľa inštrukcií.

Buďte zvlášť opatrný pri ošetrovaní kože napr. u detí alebo na hornej časti ruky (pozri časť 3.1 Dávkovanie a podávanie a časť 3.2 Použitie u detí).

## 3. AKO POUŽÍVAŤ ENDWARTS ORIGINAL

### 3.1 DÁVKOVANIE A PODÁVANIE

Na účinné použitie stačí veľmi malé množstvo roztoku. Dávajte pozor, aby ste sa dotkli iba bradavice a nedotýkali ste sa okolia kože, pokiaľ sa **dotknete okolitej pokožky** alebo pokiaľ čítate štípanie, miesto okamžite opláchnite vodou, aby ste utišili bolesť (pozri tiež 2.1 NEPOUŽÍVAJTE ENDWARTS ORIGINAL a 4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY). Pozorne si prečítajte nižšie uvedené pokyny, nakoľko roztok je žieravina. Pri aplikácii vždy používajte priložený štetec, ktorý je súčasťou viečka. Pri aplikácii roztoku veľmi starostlivo chráňte fľaštičku, aby sa tekutina nerozliala. Nedržte fľaštičku v ruke počas ošetrovania. Položte fľaštičku na drevo alebo iné podobné miesto. Rozliata tekutina by mohla poškodiť vašu pokožku alebo farebné povrchy, textilie a pod. Po použití fľašu pevne uzavrite uzáverom bezpečným pred deťmi.

1



Držte fľašku pevne, opatrne otvorte uzáver s detskou bezpečnostnou poistkou, pri prvom použití silou odstráňte bezpečnostný krúžok a pred úplným vytiahnutím štetca ho opatrne nechajte asi 1 sekundu odkvapkať na vnútornej strane fľašky, aby sa odstránil prebytočný roztok zo štetca. Dajte pozor, aby roztok odkvapkal do vnútra fľašky a nie zvonka; roztok je žieravý a pri kontakte s normálnou pokožkou môže spôsobiť poškodenie kože (pozri 4. Možné vedľajšie účinky). Štetec má byť iba vlhký.

2



Nezabudnite nechať odkvapkať štetec (ako je uvedené v bode 1.) a potom vždy dvakrát natierať bradavicu štetcom po dobu jednej sekundy. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli okolitej pokožky. Ak sa dotknete okolitej pokožky alebo ak máte pocit pálenia, okamžite ju umyte studenou vodou, aby ste zmierili bolesť. Bradavice umiestnené na chrbte rúk alebo na zadnej strane chodidla alebo na vnútornej strane kolien, alebo na vonkajšej strane lakťov, kde je pokožka citlivejšia, by sa mali ošetrovať opatrne, aby sa zabránilo dotyku s okolitou kožou.

Vždy používajte štetec spojený s viečkom. Ak sa štetec poškodí alebo vytrhne, prestaňte prípravok používať.

Prípravok EndWarts ORIGINAL môže používať viac ako jedna osoba. Predtým ako po vás začne ďalšia osoba používať prípravok EndWarts ORIGINAL, zatvorte viečko a ponechajte štetec v kontakte s roztokom vo fľaštičke po dobu najmenej 5 minút. Tým sa zabráni možnému preneseniu bradavíc na druhú osobu.

Pre úspešné ošetrovanie opakujte **pravidelne** jedenkrát týždenne, kým bradavica úplne nezmizne, inak sa proces zastaví. Ak je aplikácia nepravidelná, celý proces trvá dlhšie.

**Staré a/alebo veľké bradavice** u dospelých môžu byť po 4 – 5 aplikáciách ošetrovaných každých 5 dní, ak pokožka nie je podráždená. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom. **Nepoužívajte nadmerne!**

Pri ošetrovaní bradavíc na **tenkej pokožke** občas postačí menej roztoku. Prebytočnú tekutinu odsajte pred použitím do vreckovky. Znížte frekvenciu napr. na každý druhý alebo tretí týždeň.

Pri ošetrovaní **viacerých bradavíc**, začnite ošetrovať niekoľko vybraných bradavíc po dobu 2 týždňov. Pokiaľ nedôjde k poškodeniu pokožky, pokračujte v ošetrovaní ostatných bradavíc. Niekoľko malých bradavíc **môže byť ošetrených** naraz bez opakovaného namáčania štetca do roztoku EndWarts ORIGINAL (na jedno namočenie je možné ošetriť 1 – 5 bradavíc, niekedy aj viac, v závislosti od ich veľkosti). Začnite najväčšími bradavicami.

Medzi ošetreniami zmäknite bradavicu bežným telovým mliekom alebo olejom. Zbytky bradavice sa budú ľahšie uvoľňovať.

Na začiatku sa môže bradavica aj zväčšiť a zbelieť predtým, než začne zasychať. Keď sa bradavica zväčší, okolitá koža môže byť citlivejšia. Dajte pozor, aby bradavica nezarástla do kože, ktorá by ju prekryvala (pozri nižšie).

Ak je bradavica citlivá alebo v nej pociťujete šklbanie, môže to byť spôsobené predávkovaním roztoku (pozri časť 2.1 Nepoužívajte EndWarts ORIGINAL), alebo sa bradavica nemôže dostať von cez prerastajúcu kožu. Ak je bradavica prekrytá kožou, je potrebné urobiť otvor na koži napr. použitím pinzety, aby sa bradavica mohla dostať von. Ak máte starú alebo zatvrdnutú bradavicu, pred ošetrovaním namočte postihnuté miesto do teplej vody, kým koža nezmäkne. Strhnite alebo zoškrabte kožu na povrchu bradavice, napr. použitím pinzety. Zhrubnutú kožu v prípade zarastených verúk (bradavice na chodidlách) starostlivo odstráňte. U kutikulárnych bradavíc možno budete musieť prepichnúť malý otvor na koži, aby roztok mohol preniknúť ku bradavici.

Bradavice nepilujte. Bradavice sa tak môžu stať citlivými a znova zatvrdnúť.

Po niekoľkých ošetrovaniach sa na bradavici zvyčajne objavia čierne škvrny. Sú to jemné kapiláry, ktoré zasobujú bradavicu krvou. Je to znak toho, že bradavica začína miznúť a s aplikáciou je potrebné pokračovať, kým čierne škvrny a bradavica úplne nezmiznú. Niekedy môžu čierne škvrny trochu krváčať, ak ste bradavicu poškriabali. Počkejte niekoľko minút s aplikáciou EndWarts ORIGINAL, kým sa krvácanie nezastaví, inak vás to môže trochu štípať. Ak vás to páli alebo štípe, bolesť ihneď utište studenou vodou.

### 3.2 POUŽITIE U DETÍ

U detí by mal ošetrovanie vykonávať vždy dospelý. Dôsledne dodržiavajte pokyny v časti 3.1 DÁVKOVANIE A PODÁVANIE, lebo roztok je žieravina. Malé deti majú jemnú a tenkú pokožku. Roztok EndWarts ORIGINAL používajte u detí veľmi striedom. Jedno namočenie do roztoku postačí na niekoľko bradavíc. Bradavice zvyčajne zmiznú po 2 – 3 ošetrovaniach.

**Deti do 4 rokov** môžu byť ošetrované EndWarts ORIGINAL, ale vždy sa uistite, že je to naozaj bradavica a nie iný kožný defekt. Pred ošetrovaním sa poraďte so svojím všeobecným lekárom alebo detským lekárom. U detí do 4 rokov je zvlášť dôležité používať menšie množstvo roztoku. Ošetrte menej často, približne každé 2 – 3 týždne.

- Vždy vysajte prebytočný roztok do vreckovky a potom na bradavicu zľahka pritlačte jeden alebo dvakrát.
- Dajte pozor, aby ste sa nedotkli okolitej pokožky.
- Ak má dieťa tendenciu cmúľať miesto s bradavicou, môžete ošetrené miesto umyť vodou. Roztok už prenikol do bradavice.
- Ak miesto počas ošetrovania páli alebo štípe, opláchnite bradavicu studenou vodou a viac už roztok neaplikujte. Už prenikol do bradavice.

### 3.3 POUŽITIE U PACIENTOV S DIABETOM

Diabetici môžu používať EndWarts ORIGINAL k ošetrovaniu bradavíc len na zdravej koži (nepoškodená a nepostihnutá v dôsledku diabetu) a s veľkou opatrnosťou. V prípade problémov sa vždy poraďte so svojím lekárom, zdravotnou sestrou alebo pedikérom.

### 3.4 AKO DLHO SA MÁ ENDWARTS ORIGINAL POUŽÍVAŤ

EndWarts ORIGINAL je veľmi účinný – väčšina bradavíc zmizne a už sa viac neobjaví. Občas sa ale môžu po začatí aplikácie objaviť bradavice, ktoré boli dovtedy pod kožou.

Bradavice môžu vyzerať veľmi rozlične a preto čas potrebný na ich odstránenie sa môže líšiť, zvyčajne 5 – 15 ošetrení. Môže tiež trvať kratšiu alebo aj dlhšiu dobu. Faktory, ktoré ovplyvňujú dĺžku odstránenia bradavice zahŕňajú vek, druh bradavice, stav vášho imunitného systému, lokalizáciu bradavice a ako dlho je už bradavica prítomná. Znížená imunitná odpoveď a súběžná liečba napr. kortizónom, sú faktory, ktoré môžu predĺžiť dĺžku odstránenia. Nové bradavice sa odstraňujú ľahšie ako staré. Bradavice u detí sa zvyčajne odstraňujú ľahšie ako u dospelých. U zarastených verúk a kutikulových bradavíc, ktoré môžu byť prítomné už niekoľko rokov, môže trvať dlhšiu dobu, kým spozorujete, že aplikácia riadne účinkuje a trvá výrazne dlhšiu dobu, kým bradavica úplne zmizne.

### 3.5 KEDY BY STE MALI PRESTAŤ POUŽÍVAŤ ENDWARTS ORIGINAL

Prestaňte používať EndWarts ORIGINAL, keď nie sú viditeľné čierne bodky alebo keď bradavica odpadla, zoschla, alebo na mieste bradavice je "diera". Koža sa potom vráti do normálu. Ak budete pokračovať v aplikácii príliš dlho po zmiznutí bradavice, koža zružovie a zmková. V takom prípade musíte okamžite ukončiť aplikáciu EndWarts ORIGINAL. Po niekoľkých týždňoch skontrolujte ošetrované miesto; ak spozorujete malú bodku, môžu to byť zvyšky bradavice. V takom prípade budete musieť ošetrovanie EndWarts ORIGINAL zopakovať.

### 3.6 TEHOTENSTVO A DOJČENIE

Nie sú známe riziká pri používaní EndWarts ORIGINAL u tehotných a dojčiacich žien.

## 4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

EndWarts ORIGINAL obsahuje silnú kyselinu. Ak sa použije príliš veľa roztoku alebo sa nesprávne použije, môže poškodiť vašu pokožku (pozri časť 2.1 Nepoužívajte EndWarts ORIGINAL). Dodržiavajte pokyny v časti 3.1 Dávkovanie a podávanie, aby ste sa vyhlí poškodeniu pokožky.

V mieste aplikácie sa môžu objaviť dočasné vedľajšie účinky, napr. citlivosť, pichanie, bolesť, začervenanie, pocit pálenia alebo krvácanie z krvných kapilár. Prerušte aplikáciu, kým sa pokožka nezotaví.

Predávkovanie, nesprávne použitie alebo rozliatie môžu spôsobiť závažnejšie vedľajšie účinky ako sú pluzgieri, rany, tmavá pigmentácia kože, chemické popáleniny, zápal, odumretie kože (nekróza) alebo zjazvenie. Poranené miesto udržiajte čisté, aby ste zabránili infekcii. Prerušte aplikáciu, a v prípade závažného poškodenia kože, kontaktujte svojho lekára.

EndWarts ORIGINAL má silný zápach, ktorý môže byť dráždivý pre dýchacie cesty a oči. Neovoniavajte obsah fľašky. Môže sa vyskytnúť napr. podráždenie dýchacích ciest a/alebo hrdla, nádcha, slzenie očí alebo problémy s dýchaním.

Ojedinele boli hlásené prípady alergickej reakcie ako napr. začervenanie, vyrážka a svrbenie.

## 5. UCHOVÁVANIE A ĎALŠIE INFORMÁCIE

**Uchovávanie:** Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávajte pri izbovej teplote (15–25°C), chráňte pred priamym slnečným svetlom.

**Obsah:** kyselina mravčia, voda, glycerol.

**Balenie:** sklenná fľaška so skrutkovacím uzáverom s detskou poistkou a viečkom spojeným so štetcom, ktorá obsahuje 3 ml alebo 5 ml roztoku, návod na použitie.

**Doba použiteľnosti:** pozri dátum expirácie na fľaši alebo na škatuľke.

Tento návod na použitie bol naposledy revidovaný v januári 2021.